

# ACCU-CHEK® Multiclix stappenkaart

## Bloed prikken met de Accu-Chek Multiclix

### Vorbereiding



#### Lancethouder plaatsen

- Pak de dop bij de inkeping en trek hem eraf.
- Plaats de lancethouder in de Accu-Chek Multiclix prikpen met de blauwe ring naar voren.
- Duw de houder aan tot u een klik hoort.
- Doe daarna de dop weer op de pen.



#### Prikdiepte instellen

- Kies de juiste prikdiepte door aan de instelring te draaien.
- Als u de Accu-Chek Multiclix prikpen voor het eerst gebruikt, begin dan met stand 1.



#### Lancethouder vervangen

- Als er geen witte streepjes meer te zien zijn in het venster is het laatste lancet in gebruik.
- Vervang de lancethouder nadat u het laatste lancet hebt gebruikt.
- Verwijder hiervoor de dop en haal de gebruikte houder uit de pen. Een rode streep op de houder geeft aan dat een lancethouder al is gebruikt.
- U kunt de gebruikte lancethouder weggooid met het huishoudelijk afval.

#### Let op!

Een lancethouder die uit de prikpen is verwijderd, kan niet worden herplaatst.

### Prikken in drie stappen



#### Aanspannen

- Druk de aanspanknop naar beneden.
- Als de prikpen aangespannen is, wordt de transparante ontspanknop geel.



#### Prikken

- Druk de pen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de ontspanknop.



#### Doordraaien

- Om het lancet te vervangen draait u de aanspanknop in de richting van de pijl tot deze niet meer verder kan en draai hierna weer terug naar de beginstand.
- De witte streepjes in het venster van de aanspanknop geven aan hoeveel lancetten er nog over zijn.

De Accu-Chek Softclic is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.



**ACCU-CHEK®**


Leven. Zoals ik het wil.

De gepatenteerde technologie van de Accu-Chek prikpenen


Dankzij de gepatenteerde Clixmotion-technologie, die bewegingen van het lancet vanuit twee richtingen stuurt, garandeert Accu-Chek een veilige en nagenoeg pijnloze prik.

De beweging van de Accu-Chek lancetten gebeurt beheersd, zonder zijwaartse trillingen van het lancet. Deze gecontroleerde, loodrechte beweging garandeert een nagenoeg pijnloze prik. Het lancet dringt de huid binnen met een bijzonder snelle, rechtlijnige beweging, waardoor huidbeschadigingen en -scheurtjes, doorgaans veroorzaakt door een zijdelingse beweging, vermeden worden. Wanneer het lancet zijn prikdiepte heeft bereikt trekt het zich onmiddellijk volledig terug, gecontroleerd en in een rechte lijn. De hele beweging gebeurt zo snel dat die nauwelijks opgemerkt wordt.

#### Clixmotion technologie

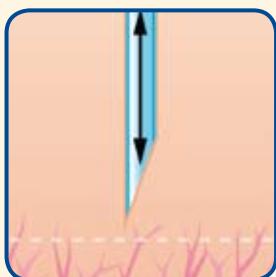

#### Conventionele technologie

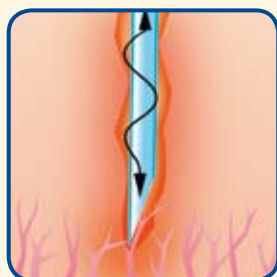

#### Clixmotion technologie

- De 'dual-guided' lancet beweging is een gepatenteerde technologie
- een gecontroleerde, loodrechte beweging van het lancet waardoor huidbeschadigingen en -scheurtjes, doorgaans veroorzaakt door een zijdelingse beweging, worden vermeden.
- Het lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt met optimale hoeken. Hierdoor gaat het doordringen van de huid voorzichtig en vrijwel pijnloos.

#### Elke test een nieuw lancet

Hygiëne is altijd ontzettend belangrijk wanneer het gaat om prikken in de huid. Nieuwe, ongebruikte Accu-Chek lancetten zijn altijd steriel. Eenmalig gebruik van een lancet wordt daarom geadviseerd. Alleen door elke test een nieuw lancet te gebruiken wordt er hygiënisch getest. Na gebruik kan de lancet veilig verwijderd worden uit de prikpen zonder dat men het lancet hoeft aan te raken.



Dit symbool geeft aan dat er wordt voldaan aan de voorwaarde van de European Medical Device Directive en geeft aan dat de lancetten zijn gemaakt voor 'eenmalig gebruik'. (Het symbool wordt weer gegeven op elk lancetverpakking.)

#### Naast prikpenen heeft Accu-Chek verschillende bloedglucosemeters in het assortiment

Accu-Chek Aviva



Accu-Chek Compact Plus

#### Meer informatie:

0800 - 022 05 85

[www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl)  
[almere.dc@roche.com](mailto:almere.dc@roche.com)

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MULTICLIX en CLIXMOTION zijn handelsmerken van Roche. © Roche Diagnostics 2008



Roche Diagnostics  
Postbus 1007  
1300 BA Almere

**ACCU-CHEK®**

Leven. Zoals ik het wil.