

ACCU-CHEK® Aviva stappenkaart

Metten van uw bloedglucosewaarden



1. Codechip plaatsen

- Zet de meter uit.
- Verwijder de oude codechip (indien aanwezig) uit de meter.
- Voer de chip uit de nieuwe verpakking teststrips in.
- Laat de codechip in de meter tot u een nieuwe verpakking teststrips aanbreekt.
- Als de eerste teststrip uit een nieuwe verpakking wordt ingevoerd voor een test, controleer dan of het codenummer op de display overeenkomt met het codenummer op de nieuwe verpakking.



4. Let op

- Zodra de zandloper op de display knippert, is er voldoende bloed door de teststrip opgezogen.
- Als u bloed heeft aangebracht, maar u ziet geen zandloper knipperen, dan kunt u binnen vijf seconden extra bloed aanbrengen.
- Indien het niet lukt om binnen 5 seconden opnieuw bloed aan te brengen, is het noodzakelijk om de test met een nieuwe teststrip uit te voeren.



2. Teststrook invoeren

- Neem een Accu-Chek Aviva teststrook uit de flacon en sluit de flacon weer.
- Voer de teststrook in de meter.
- De meter gaat automatisch aan.
- In beeld verschijnt een codenummer.
- Dit nummer dient gelijk te zijn aan de code op de flacon.
- Het teststripsymbool en een knipperend bloeddruppelsymbool verschijnen op de display.



5. Resultaat aflezen

- Na ca. 5 seconden verschijnt het resultaat. Dit wordt automatisch in het geheugen van de meter opgeslagen.



3. Bloed aanbrengen

- Het is aan te raden om voor het prikken de handen met warm water te wassen en goed af te drogen.
- Prik, met bijvoorbeeld de Accu-Chek Multiclix, in de zijkant van de vingertop van bij voorkeur uw ring- of middelvinger.
- Houd de bloeddruppel tegen de uitsparing aan de voorkant van het gele testveld van de teststrip. De teststrip zuigt zich vol.



6. Bekijken van geheugen

- Zet de meter aan door op de linker- of rechter pijltoets te drukken.
- De laatst gemeten waarde verschijnt in beeld.
- Druk op de linker pijltoets om voorgaande resultaten in het geheugen te bekijken.
- Druk op de rechter pijltoets om terug te keren naar de laatst gemeten waarde in het geheugen.
- Druk op de rechter pijltoets om achtereenvolgens het gemiddelde van de afgelopen 7, 14 en 30 dagen te bekijken.

ACCU-CHEK® Multiclix

Drie stappen voor sneller, eenvoudiger en veiliger prikken



1

1. Aanspannen

- Druk de aanspanknop naar beneden,.
- Als de prikken aangespannen is, wordt de transparante ontspanknop geel.



2

2. Prikken

- Druk de pen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de ontspanknop.



3

3. Doordraaien

- Om het lancet te vervangen draait u de aanspanknop in de richting van de pijl tot deze niet meer verder kan en draai hierna weer terug naar de beginstand.
- De witte streepjes in het venster van de aanspanknop geven aan hoeveel lancetten er nog over zijn.


Clixmotion

De gepatenteerde technologie van de Accu-Chek prikpennen

Dankzij de gepatenteerde Clixmotion-technologie, die bewegingen van het lancet vanuit twee richtingen stuurt, garandeert Accu-Chek een veilige en nagenoeg pijnloze prik.

De beweging van de Accu-Chek lancetten gebeurt beheersd, zonder zijwaartse trillingen van het lancet. Deze gecontroleerde, loodrechte beweging garandeert een nagenoeg pijnloze prik. Het lancet dringt de huid binnen met een bijzonder snelle, rechtlijnige beweging, waardoor huidbeschadigingen en -scheurtjes, doorgaans veroorzaakt door een zijdelingse beweging, vermeden worden. Wanneer het lancet zijn prikdiepte heeft bereikt trekt het zich onmiddellijk volledig terug, gecontroleerd en in een rechte lijn. De hele beweging gebeurt zo snel dat die nauwelijks opgemerkt wordt.

Clixmotion technologie

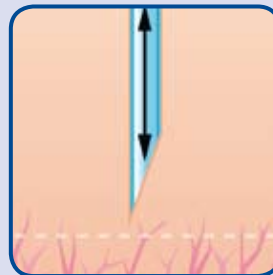

Conventionele technologie



De Accu-Chek Multiclix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikken mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.

ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK MULTICLIX en CLIXMOTION zijn handelsmerken van Roche. © Roche Diagnostics 2008



Roche Diagnostics
Postbus 1007
1300 BA Almere

ACCU-CHEK®

Leven. Zoals ik het wil.