

# ACCU-CHEK<sup>®</sup> Smart Pix

Versie 2.0

## Zo eenvoudig werkt Accu-Chek Smart Pix



### Aansluiten en opstarten

- Steek de USB-stekker in een vrije poort van uw computer. Uw computer herkent Accu-Chek Smart Pix automatisch en opent een nieuw venster met Accu-Chek Smart Pix bestanden.
- Dubbelklik op het bestand "START.HTM". Accu-Chek Smart Pix wordt gestart.<sup>1</sup>



### Gegevens overbrengen

- Activeer de gegevensoverdracht van uw Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp (zie achterzijde van deze stappenkaart).
- Leg uw Accu-Chek bloedglucosemeter of insulinepomp met het infraroodvenster voor Accu-Chek Smart Pix.
- Klik op "Apparaat zoeken" bovenin het scherm. De gegevens worden nu door Accu-Chek Smart Pix ontvangen en zullen na korte tijd weergegeven worden.




### Instellingen

Voor het eerste gebruik kunt u Accu-Chek Smart Pix naar wens instellen:

- Klik op "Instellingen" of "Settings" bovenin het scherm. Met de opties in het menu kunt u taal (language), display-opties, persoonlijke en rapportage-opties instellen.
- Sla de wijzigingen op door op de knop "Opslaan" te klikken.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van uw computer kan het noodzakelijk zijn "Actieve inhoud" (tijdelijk) toe te staan.

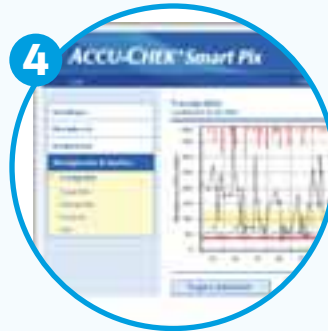

### Grafieken en overzichten

- Via het menu kunt u verschillende grafieken en overzichten bekijken en afdrukken.
- Om een rapport te maken van de door u gewenste grafieken en overzichten klikt u op "Rapportage samenstellen" bovenin het scherm.
- Kies de grafieken en overzichten die u toe wilt voegen aan uw rapportage.
- Klik op "Rapport samenstellen" onderin het scherm. Accu-Chek Smart Pix opent nu een nieuw venster met het door u samengestelde rapport<sup>1</sup>. Dit rapport kunt u vervolgens afdrukken.



### Rapporten opslaan en versturen

- U kunt de rapportage van Accu-Chek Smart Pix ook opslaan en vervolgens versturen via e-mail. (zie hiervoor de achterzijde van deze stappenkaart).



# ACCU-CHEK® Smart Pix

Versie 2.0

## Veelgestelde vragen

### Hoe kan ik mijn Accu-Chek Smart Pix rapportage opslaan?

- Stel eerst een rapport samen zoals omschreven bij stap 4 van deze stappenkaart.
- Klik in het venster van de rapportage in de menubalk<sup>2</sup> op "Bestand" en vervolgens op "Opslaan als".
- Kies de map waarin u uw rapportage wilt opslaan en kies bij de optie "Opslaan als" voor het opslaan als "Webarchief (\*.mht)".
- Klik op "Opslaan". Uw rapportage wordt nu als één bestand opgeslagen. U kunt dit bestand later openen door erop te dubbelklikken.

### Hoe kan ik gegevens uit een tweede bloedglucosemeter aan de grafieken en overzichten toevoegen?

Om meerdere bloedglucosemeters (maximaal 3) uit te kunnen lezen, moet u deze mogelijkheid éénmalig in Smart Pix activeren:

- Klik op "Instellingen" bovenin het menu.
- Klik op "Instellingen rapportage".
- Kies bij data samenvoegen voor het symbool met drie meters en sla de wijziging op door op „opslaan“ te klikken.
- U kunt nu meerdere meters *na elkaar* uitlezen. De gegevens uit de meters zullen door Accu-Chek Smart Pix samengevoegd worden.

### Waar vind ik de grafieken en overzichten met gecombineerde bloedglucosemeter- en insulinepompdata?


Grafieken en overzichten met gecombineerde bloedglucosemeter- en insulinepompdata verschijnen zodra u gegevens van zowel uw bloedglucosemeter als insulinepomp heeft overgebracht. De datum en tijd moeten hiervoor in beide apparaten gelijk zijn ingesteld.

- Breng eerst de gegevens van uw Accu-Chek bloedglucosemeter over naar Accu-Chek Smart Pix. (zie stap 3)
- Breng vervolgens de gegevens van uw Accu-Chek insulinepomp over naar Accu-Chek Smart Pix. (zie stap 3)
- Na de gegevensoverdracht van uw bloedglucosemeter en insulinepomp vindt u in het menu onder "Bloedglucose & Insuline" gecombineerde grafieken en overzichten.

### Hoe activeer ik de gegevensoverdracht van mijn bloedglucosemeter of insulinepomp?


#### Accu-Chek Aviva:

Zorg dat de meter is uitgeschakeld. Houd de 2 pijltjestoetsen tegelijkertijd ingedrukt tot u op het display afwisselend 2 pijlen ziet knipperen. De gegevens worden nu verstuurd. Uw bloedglucosemeter schakelt zich daarna automatisch uit.

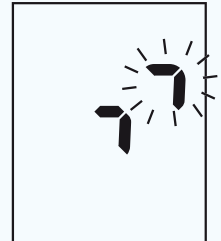

#### Accu-Chek Compact Plus:

Zorg dat de meter is uitgeschakeld. Houd de S- en de M-toets tegelijkertijd ingedrukt tot u op het display afwisselend 2 pijlen ziet knipperen. De gegevens worden nu verstuurd. Uw bloedglucosemeter schakelt zich daarna automatisch uit.

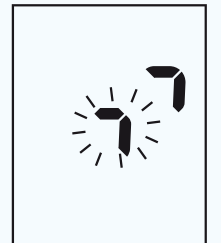

#### Accu-Chek Spirit:

Zorg dat de pomp in de STOP-stand staat. Druk meerdere malen op de Menu-toets om naar het communicatiemenu te gaan en druk op de Vink-toets. Het scherm datatransmissie geeft aan dat gegevens nu verstuurd worden. Druk na voltooiing op de Vink-toets om terug te gaan naar de STOP-stand.



#### Accu-Chek D-TRONplus:

Zorg dat de pomp in de STOP-stand staat. Druk 4x op de Menu-toets tot "C --" in de display staat en druk op de Vink-toets. Het scherm "≡ C ≡ ≡" geeft aan dat gegevens nu verstuurd worden. Druk na voltooiing op de Vink-toets om terug te gaan naar de STOP-stand.



<sup>2</sup> Menustructuur en opties kunnen afwijken in andere browsers dan Microsoft® Internet Explorer